



ČSN EN ISO 9001:2000

# TECHNICKÝ LIST

DEZIPUR

Revize: Vo 24/08/09-2



## DEZIPUR

### ALKALICKÝ PRÁŠKOVÝ PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI NÁSTROJŮ

**Použití přípravku:** Práškový prostředek na bázi aktivního kyslíku. Účinný pro mytí menších ploch a nástrojů. Uplatnění především pro balneologii, stomatologii a soukromou praxi.

*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.*

**Technologie aplikace přípravku:** Přípravek se rozpustí ve studené pitné vodě cca 10 minut před použitím. Dezinfikovaný materiál se ponoří do připraveného roztoku po uvedené dobu expozice. Poté se opláchnou vodou, vysuší a sterilizuje.

**Na chirurgické nástroje a plochy:** koncentrace 10g/kg, expozice 60 min, účinnost AB  
koncentrace 20g/kg, expozice 30 min, účinnost AB,  
koncentrace 20g/kg, expozice 60 min, účinnost ABTM

**Na balneoterapii /vany/:** koncentrace 20g/kg, expozice 2-5 min, účinnost A

#### Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Vzhled: Bílý až nažloutlý prášek polydisperzního charakteru.

pH (1 % roztok, 20 °C): < 10

#### Údaje o nebezpečnosti přípravku:

**Přípravek obsahuje:** peroxyoctová kyselina 0,5g/100g, benzalkonium chlorid 1 g /100 g  
> 30 % fosfáty; 15-30 % bělicí látky na bázi aktivního kyslíku,  
< 5% neionické tenzidy

**Klasifikace přípravku:** Xi Dráždivý

**Nebezpečí pro osoby a životní prostředí:** R 36/38 Dráždí oči a kůži.

Xi



dráždivý

S 3-26-28-36/37/39-45

Uchovávejte v chladnu. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Výrobce: MPD plus, s.r.o. Rakovník, Nábřeží Dr. Beneše 2307, Rakovník CZ 26901

Informace na telefonu: + 420 313 513 961, Fax: +420 313 512 834

E-mail: [firma@mpd.cz](mailto:firma@mpd.cz),


[www.mpd.cz](http://www.mpd.cz)



# TECHNICKÝ LIST

DEZIPUR

Revize: Vo 24/08/09-2

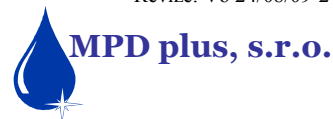

ČSN EN ISO 9001:2000

**Legislativa:** Registrace bezpečnostního listu Ministerstvem zdravotnictví  
ČR REG-3371-19.06.03/17471

## **Pokyny pro manipulaci a skladování:**

**Pokyny pro manipulaci:** Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Nesmí přijít do styku se silně redukcujícími látkami.

**Požadavky na skladovací prostory a nádrže:** Skladujte v původních obalech, suchu, v dobře větraných místnostech, při teplotách + 5 až + 25 °C. Chraňte před horkem a přímým slunečním světlem. Vlhkost přípravků nepoškozuje. Přepravujte pouze v originálním balení. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí.

**Informace ke společnému skladování:** Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.

## **Informace pro přepravu:**

**Pozemní přeprava:** Neení nebezpečné zboží.

**Likvidace zbytků:** Obaly od výrobků je třeba dokonale vyprázdnit. Po vyčištění je možno opět použít. Nepoužitelné obaly se likvidují v souladu s místními předpisy, především do tříděného odpadu. Za obaly je placen zákonný poplatek firmě Eko-kom, což umožňuje likvidaci po vymytí do obalového odpadu v systému komunálního odpadu.

## **Balení:**

<b><u>EURO PALETA (800 x 1200 mm)</u></b>	<b>700 g</b>	<b>3 kg</b>
	<b><u>1L širokohrdlá PP lahev</u></b>	<b><u>PP kyblík</u></b>
<b><u>počet vrstev:</u></b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b><u>počet krabic v 1 vrstvě:</u></b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b><u>počet obalů v 1 krabici:</u></b>	<b>9</b>	<b>4</b>
<b><u>počet obalů v 1 vrstvě:</u></b>	<b>72</b>	<b>32</b>
<b><u>počet krabic / obalů celkem:</u></b>	<b>40 /360</b>	<b>40 /160</b>